

Instrukcja dezynfekcji



Zaleca się używanie specjalnego środka dezynfekującego STER 1 PLUS (CEFLA), który jest kompatybilny z:

- Powierzchniami lakierowanymi i częściami z tworzywa sztucznego
- Tapicerką
- Powierzchniami metalowymi, niemalowanymi



W przypadku stosowania produktów innych niż STER 1 PLUS, zaleca się produkty, których skład zawiera:

- Etanol w stężeniu maksymalnym 30g na 100g środka odkażającego.
- 1-Propanol (n-propanol, alkohol propionowy, alkohol n-propionowy) w stężeniu maksymalnym 20g na 100g środka odkażającego.
- Połączenie etanolu i propanolu w stężeniu maksymalnym 40g na 100g środka odkażającego.

Zabrania się stosowania środków zawierających:

- alkohol izopropylowy (2-propanol, izopropanol)
- podchloryn sodowy (wybielacze)
- fenol



Zabronione jest spryskiwanie, zanurzanie lub moczenie urządzenia w płynach dezynfekujących oraz mycie instrumentów w myjkach ultradźwiękowych.