

KONSERWACJA AUTOKLAWU

CODZIENNIE

- Spuszczanie wody brudnej na koniec dnia





RAZ W TYGODNIU


- Przed jednodniową lub dłuższą przerwą w pracy autoklawu - spuszczenie wody czystej (zalecane spuszczać na weekend i na okres zamknięcia gabinetu)



- Czyszczenie filtra komory (zalecane czyszczenie za pomocą małej pęsety)

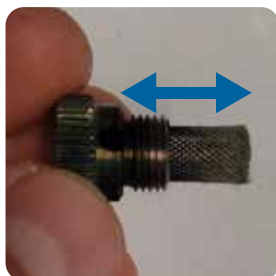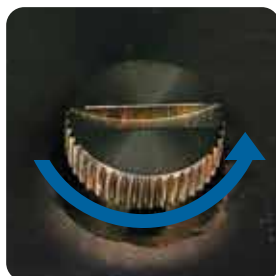

- Czyszczenie uszczelki, rantu komory i samej komory (zalecane czyszczenie za pomocą gąbki bądź ręcznika papierowego tylko przy użyciu wody)

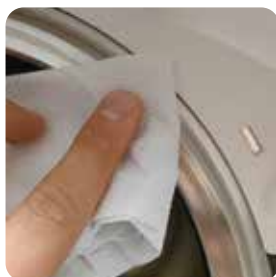

Raz w roku skontaktować się z Stern Weber Polska w celu przeprowadzenia przeglądu technicznego



www.sternweber.pl