

Zasady użytkowania i konserwowania kamery wewnątrzustnej C-U2



Konserwacja:

1. Należy zawsze odłączać zasilanie przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zewnętrznych.
2. W celu czyszczenia i dezynfekcji używać miękkiej i wilgotnej szmatki, jednorazowego papieru miękkiego i nie ściernego (uniknąć używania papieru z recyklingu) albo sterylnej gazy. Odradza się używania szmatek z frotte i jakiegokolwiek materiału wielokrotnego użytku.



Użytkowanie:

Oślona (z białym wpustem) jest zamknięta wewnątrz dwóch ochronnych taśm: jednej przedniej, przezroczystej, z wpustem niebieskim i jednej tylnej, papierowej. Aby prawidłowo umieścić osłonkę jednorazową należy postępować w następujący sposób:

1. Wprowadzić dystalną część rękojeści pomiędzy błonę z białym wpustem, a tylną błonę papierową. Obiektyw otoczony diodami LED musi być skierowany w dół, czyli w stronę tylnej błony papierowej. Delikatnie wcisnąć rękojeść do samego końca.
2. Usunąć błony zabezpieczające, pociągając niebieski wpust.
3. Kamera jest teraz zabezpieczona i gotowa do użytku.



Uwagi:

Zabronione jest spryskiwanie i moczenie urządzenia w płynach dezynfekujących. Rękojeść nie jest odporna na zanurzenie w płynach. Może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów elektronicznych.

- Należy zawsze używać rękojeści z jednorazową osłoną i upewnić się, że rękojeść jest prawidłowo umieszczona wewnątrz osłony.
- W żadnym przypadku nie zanurzać rękojeści w płynach ani nie umieszczać w autoklawie.
- Nie wystawiać rękojeści na działanie strumieni wody i nie przechowywać jej w wilgotnych miejscach.
- Zawsze używać urządzenie ze specjalną osłonką jednorazową, która musi być wymieniana przed przyjęciem każdego następnego pacjenta. Produkt jest dostarczany z 50 osłonami, które mogą zostać następnie zakupione w sklepie internetowym Stern Weber Polska.
- Po nałożeniu nowej, jednorazowej osłonki należy zweryfikować jej integralność przed użyciem kamery, sprawdzając, czy nie istnieją oznaki uszkodzenia. W przypadku ich wystąpienia należy usunąć osłonę i nałożyć nową.

